



In wenigen Schritten zur sanften Blutgewinnung



Vorbereitung

Waschen Sie Ihre Hände mit warmem Wasser und Seife, bevor Sie Blut entnehmen. Trocknen Sie Ihre Hände gut ab.



Kappe abziehen

Ziehen Sie die Kappe von der Stechhilfe ab.



Lanzette einsetzen

Setzen Sie eine neue Lanzette in den Lanzettenhalter ein. Drehen Sie die Schutzkappe von der Lanzette ab. Setzen Sie die Kappe der Stechhilfe wieder auf.



Stechtiefe einstellen

Sie können 11 Stechtiefen (0,5 bis 5,5) einstellen. Drehen Sie die Kappe bis die gewünschte Stechtiefe an der Markierung steht.



Stechhilfe spannen und Blutstropfen entnehmen

Drücken Sie den Spannkнопf ganz durch. Die Stechhilfe ist gespannt, wenn die Mitte des Auslöseknopfes gelb ist. Drücken Sie die Stechhilfe fest auf die gewünschte Einstichstelle. Drücken Sie den Auslöseknopf, um Blut zu entnehmen.



Benutzte Lanzette auswerfen

Ziehen Sie die Kappe von der Stechhilfe ab und schieben Sie den Auswerfer nach vorn. Die benutzte Lanzette wird ausgeworfen. Setzen Sie die Kappe wieder auf.

ACCU-CHEK, ACCU-CHEK INSTANT und SOFTCLIX sind Marken von Roche.
© 2020 Roche Diabetes Care Deutschland

accu-check.de
Roche Diabetes Care Deutschland GmbH
Sandhofer Straße 116
68305 Mannheim